

# ezcare Lubricant

## ハンドピースメンテナンスオイル

チャック内の掃除にも有効で、ベアリングにオイルを潤滑させるので  
ベアリングが長持ちします。

### 使用方法

1 蓋を取り、ハンドピースのチャック内に1~2滴を注油



2 歯間ブラシでチャック内をみがく。

汚れが残ると、その汚れが研磨剤となりチャックとバーが痛みます。



3 お手持ちのオイルスプレーに付属の注油ノズルを付けて汚れが出なくなるまで、チャック内の汚れを押し流してください。



4 オイル洗浄完了後、余分なオイルがなくなるまで回転させてください。



## ezcare

Lubricant 100% (鉱物オイル)  
炭化水素範囲 (C16-C28 0%)

### ハンドピース メンテナンスオイル

15ml 1本 4,620 円 (税込)  
(本体価格 4,200円)

3本セット 12,100 円 (税込)  
(本体価格 1,1000円)



販売元

デンタルテクニカ

〒567-0881 大阪府茨木市上中条1-1-37-1F  
TEL : 072-621-0884 FAX : 072-621-0844  
<http://www.dentaltechnica.com>  
[info@dentaltechnica.com](mailto:info@dentaltechnica.com)

お問合せ先

202409 版