

スマートクリーナー

原理は簡単 水鉄砲!!
汚れを水圧で押し流します。

水つまりで高いメンテナンス料を払ってはいませんか?
 ジョイント(カップラー)を本機にセットするだけ!
 強力なピストンが水と一緒に汚れを押し出します。
 簡単で驚異的な洗浄力です。



早期発見!

早期解消!



全く出ない



4点注水の1点だけ
出ない



コントラのストレート
にも対応

デンタルテクニカ製オリジナル国内メーカー対応ジョイント

※オサダは除く。



スマートコネク
ト
モーター用



スマートジョイント
Yoshida用
(Oタイプ)



スマートジョイント
Yoshida用
(Nタイプ)



スマートジョイント
モリタ用

各 12,397円 (税込)
(本体価格 11,270)



複数の注水口のうち
一部つまった時に
使えます
スマートキャップ
12,397円 (税込)
(本体価格 11,270)




4Hタイプのホースを
クリーニング
スマートチューブ
12,397円 (税込)
(本体価格 11,270)

詳細は裏面を御覧ください。


ミッドウエスト
4H(ISO標準)対応タイプ
KAVOジョイント・NSKジョイント
W&Hジョイント・Sironaジョイント
etc.

標準価格
33,000円 (税込)
(本体価格 30,000円)

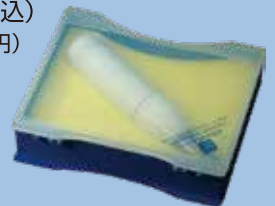

オススメ 3点セット販売のご案内

お得です

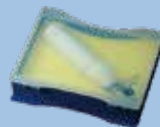

本体



スマートコネク
ト



スマートキャ
ップ

標準価格 ~~57,794円~~
(税込) **53,900円**
(本体価格 49,000円)

スマートクリーナー本体 / モーター用コネク / スマートキャップの組み合わせ限定で
他のオプションとの組み合わせ変更は出来ません。



販売元

デンタルテクニカ

〒567-0881 大阪府茨木市上中条1-1-37-1F
<http://www.dentaltechnica.com>
info@dentaltechnica.com
 TEL 072-621-0884 FAX 072-621-0844

お問合せ先

スマートクリーナーの使い方


ハンドピース装着例



1




2

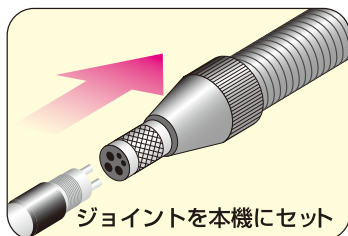

ジョイントを本機にセット

ハンドピースをカップラーごとはずし
ジョイントにセットします。

3

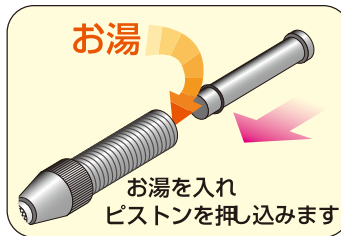


お湯

お湯を入れ
ピストンを押し込みます

水または、湯を流しこみます。
(熱めのお湯が効果的です)


4

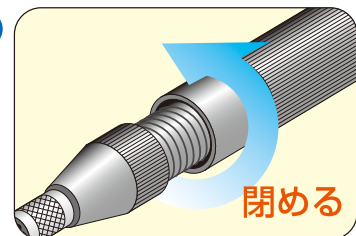

閉める

①のピストンをセットし、押します。
(出にくい場合は②のカバーをセットし、
ねじの力で押ししてください)

5

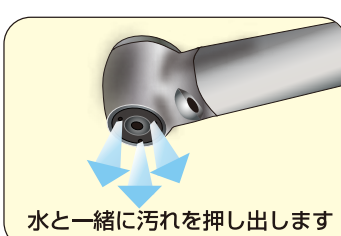

水と一緒に汚れを押し出します

数回繰り返す、ピストンがスムーズに
動くようになるまで繰り返します。


※三点注水口の水づまりは、出る穴を
(スマートカップラーやゴム手袋等)
で押さえてください。

注意

注水リングの変形など、汚れ以外の要因により、水づまりがおきている時は、スマートクリーナーでは解決しません。

スマートカップラーの使い方

スマートカップラーはハンドピースの1つの穴だけ詰まっている場合の洗浄に使用するスマートクリーナー専用のオプションです。

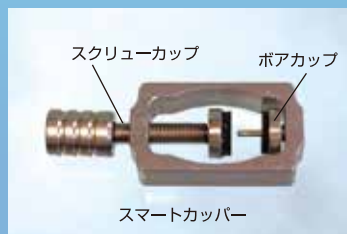

スマートカップラー

①スクリューカップをまわし
ボアカップを取りはずす



②タービンの水が出ない穴を
確認する (マジックで印を付ける
とわかりやすい)



③ボアカップをタービンに
挿入します



④②で印をつけた穴がボアカップ
から見えるように合わせる



⑤スマートカップラー本体に
固定する



⑥静かにネジを締め、スマート
クリーナーを接続し、洗浄して下さい